


Collare TOT

Per il trattamento del torcicollo

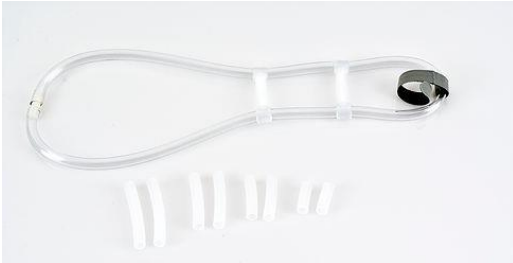

Il torcicollo muscolare congenito è scoperto solitamente nelle prime 6-8 settimane di vita. È caratterizzato da una contrattura del muscolo sternocleidomastoideo, che induce la testa ad essere flessa lateralmente dallo stesso lato della contrattura e ruotata verso la spalla opposta. Se non corretta, questa postura può portare a plagiocefalia e ad una scoliosi toracica superiore.

Per il trattamento del torcicollo muscolare congenito

Il collare TOT è facile da usare ed un efficace aiuto per la terapia per il torcicollo muscolare infantile. L'uso del collare TOT deve avvenire in combinazione al trattamento terapeutico dei bambini con il torcicollo muscolare congenito. Il collare TOT è stato progettato per fornire uno stimolo laterale del cranio. L'utente si allontana da questo stimolo verso una nuova posizione centrale corretta.

L'assunzione di nuova posizione del capo fornisce la capacità al bambino di resettare la percezione orizzontale del capo, in modo da arrivare alla posizione corretta del capo.

Il TOT Collar™ è pre-assemblato e pronto per essere montato.



Attenzione: il bambino non deve essere lasciato da solo mentre indossa questo collare. Rimuovere per dormire

Come funziona e indicazioni per l'uso.

TOT Collar™ è progettato per fornire uno stimolo all'inclinazione laterale del cranio. L'utente si allontana grazie a questo stimolo verso una nuova posizione centrale corretta. L'adozione di una nuova posizione offre la possibilità di ripristinare la percezione dell'orizzontalità e quindi di mantenere la posizione corretta della testa. L'uso del collare TOT viene aggiunto al trattamento conservativo dei neonati con torcicollo muscolare congenito se hanno 4 mesi o più e mostrano un'inclinazione della testa costante di 5 gradi o più. Il bambino deve avere una ROM adeguata (range di movimento) e una reazione di raddrizzamento laterale della testa (controllo della testa e forza) per sollevare la testa dal lato del Collare.

Istruzioni

Il collare TOT è pre-assemblato e pronto all'uso. Ci sono due taglie: Adulto e Bambino. Il tubo in pvc trasparente viene fornito al doppio della circonferenza del collo, più 4"-6" (10 cm-15 cm). Il tubo è unito con un connettore. I tubi bianchi o montanti sono selezionati in base alla quantità di inclinazione laterale della testa. I tubi aggiuntivi sono forniti con il Collare TOT per consentire il cambio dell'inclinazione laterale. Il tubo A si estende dal posteriore alla cresta del trapezio all'occipite. Tubo B* dalla parte anteriore alla cresta del trapezio fino al di sotto della punta del processo mastoideo. Evitare la pressione sulla mandibola. I montanti sono corti per iniziare, per poi essere sostituiti da montanti più lunghi quando si ottiene la correzione. Se vi è una notevole quantità di inclinazione, utilizzare inizialmente montanti molto corti. I tubi possono essere tagliati alla lunghezza esatta richiesta. Per una corretta vestibilità, il bambino dovrebbe tenere la testa in linea mediana, e ci dovrebbe essere spazio di almeno un dito di un adulto tra il tubo in pvc trasparente superiore e il collo. Innanzitutto, montare il collare in modo lasco e assicurarsi che i tubi laterali siano della lunghezza corretta e sul lato corretto. Scorrere con le mani tutto il collare a mano per verificare la vestibilità.



Rimuovere il collare dal bambino. Tagliare il tubo a misura con le forbici e ricollegarlo con il connettore finale. Far indossare di nuovo il collare dopo ogni taglio per verificare la vestibilità.

Nota: fare attenzione a non tagliare troppo il tubo in pvc trasparente, poiché non può essere ricollegato se tagliato troppo corto.

Nota: fare attenzione a non tagliare troppo il tubo in pvc trasparente, poiché non può essere ricollegato se tagliato troppo corto.

**Nella figura, parte a sinistra più larga, definito Tubo A. Parte a destra più stretta, definito tubo B*

